

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Advent life Тест за бременност с дигитален дисплей за ясен резултат (проба от урина)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тестът за бременност с дигитален дисплей е бърз и лесен за използване тест за бременност, предназначен за качествено откриване на hCG в човешка урина. За лична употреба и инвитро диагностика.

ПРИНЦИП

По време на тестването пробата реагира с частиците, покрити със специфични антитела. Сместа мигрира нагоре по мембраната хроматографски чрез капиларно действие, за да реагира със специфични улавящи антитела върху мембраната и да генерира цветна линия върху тест лентата. Резултатният сигнал се преобразува в електрически сигнал от фотодиод и след това преминава през софтуер, за да се покаже на LCD дисплея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Моля, прочетете цялата информация в тази листовка, преди да се тествате. Прочетете предпазните мерки, изброени по-долу, за да осигурите точни резултати и правилна работа на теста. Защитата, осигурена от оборудването, може да бъде нарушена, ако се използва по начин, който не е описан в това ръководство с инструкции. Не използвайте след изтичане срока на годност, отпечатан върху фолиото.

- Предназначен за употреба на закрито.
- Използвайте, съхранявайте и транспортирайте само при условията, описани по-долу.
- Условия за съхранение и транспорт: 2-30°C (35.6-86°F); ≤90% RH; 86-106 kPa
- Условия за употреба: 15-30°C (59-86°F); ≤90% RH; 86-106 kPa
- Не използвайте, ако опаковката е скъсана или повредена.
- Пазете далеч от деца.
- Предназначен за инвитро диагностика и външна употреба.
- Не отваряйте защитното фолио, преди да сте готови да започнете процедурата по тестване. След отваряне на фолиото използвайте в рамките на един час.
- Този продукт съдържа батерии, използваният тест трябва да се изхвърли според местните разпоредби.
- Степен на замърсяване: II
- Не използвайте теста повторно.
- Този дигитален тест отговаря на изискванията за емисии и имунитет. Мерките за противодействие на електромагнитната съвместимост, използвани в електронното устройство, ще осигурят достатъчна защита срещу ефектите на електромагнитни смущения, които е вероятно да се срещнат в домашната среда.
- Моля, проверете следните превантивни предупреждения:
 - а) Употребата на този инструмент в суха среда, особено при налични синтетични материали (синтетични дрехи, килими и т.н.), може да причини увреждащи електростатични разряди, които могат да доведат до неверни резултати.
 - б) Не използвайте това устройство в непосредствена близост до източници на силно електромагнитно излъчване (напр. мобилни телефони), тъй като те могат да предизвикат смущения.

МАТЕРИАЛИ

Предоставени материали: 1 Дигитален hCG тест за бременност
1 Инструкции за употреба

Необходими, но не предоставени материали: Таймер
Контейнер за проба от урина



ИНСТРУКЦИИ

Важно: По време на тестването никога не дръжте теста с абсорбиращия накрайник насочен нагоре.



КОГА ДА СИ НАПРАВИТЕ ТЕСТА

Можете да започнете да се тествате от първия ден на закъснението на цикъла Ви.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕСТА


Стъпка 1:

Когато сте готови за тестване, извадете теста от защитното фолио и премахнете капачката. Хванете теста с абсорбиращия накрайник, насочен надолу.



Дръжте теста с дисплея нагоре и поставете абсорбиращия накрайник под струя урина за 5 секунди. Внимавайте урината да не попадне върху пластмасовата част на теста.


ИЛИ

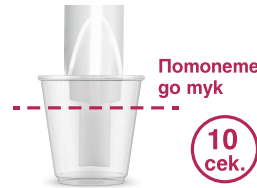

Съберете пробата урина в чист, сух контейнер и помонете целия абсорбиращ накрайник вътре за 10 секунди.

Стъпка 2:


Върнете капачката обратно върху теста и го поставете върху равна повърхност с дисплея нагоре.

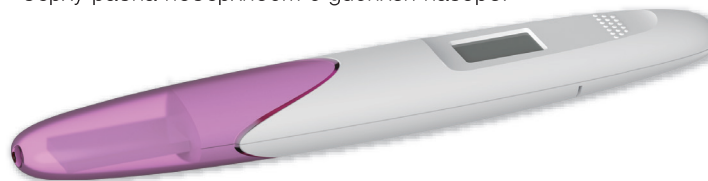

Символът на часовник ⌚ ще се появи и ще примигва на дисплея след добавяне на пробата от урина - това показва, че тестът работи.

Стъпка 3:

След около 3 минути ще се появи резултат "YES+" или "NO-" на дисплея.

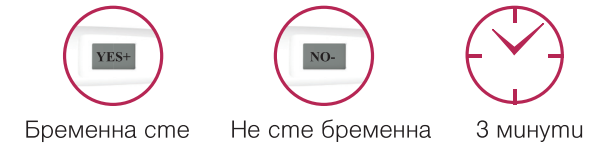

Бременна сте

Не сте бременна

3 минути



РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ



Ако на дисплея се изпише YES+, това означава, че сте бременна



Ако на дисплея се изпише NO-, това означава, че не сте бременна

Резултатът ще остане на екрана за около един час. Ако има други резултати, показани на екрана, моля, прочетете раздела "Грешки при тестване".

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има вероятност този тест да даде неверни резултати. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да вземете каквото и да е медицинско решение.

1. Лекарствата, които съдържат hCG (като Pregnyl, Profasi, APL и др.) могат да дадат фалшиво положителен резултат. Алкохолът и болкоуспокояващите, които не съдържат hCG, не би трябвало да влияят на резултата от теста.
2. Много разреждени проби от урина (с ниско специфично тегло) може да не съдържат показателни нива на hCG. Ако все още се подозира бременност, трябва да се вземе проба от първата сутрешна урина 48 часа по-късно и да се тества.
3. Този тест може да даде фалшиво положителен резултат. Редица състояния, различни от бременност, включително трофобластна болест и някои нетрофобластични неоплазми, включително тумори на местисите, рак на простатата, рак на гърдата и рак на белия дроб, причиняват повишени нива на hCG.^{1,2} Следователно наличието само на hCG в урината не трябва да се използва за диагностициране на бременност, освен ако тези състояния не са изключени.

4. Този тест може да даде фалшиво отрицателни резултати. Фалшиво отрицателни резултати може да възникнат, когато нивата на hCG са пог нивото на чувствителност на теста. Ако все още се подозира бременност, трябва да се вземе проба от първата сутрешна урина 48 часа по-късно и да се тества. В случай че се подозира бременност и тестът продължава да дава отрицателни резултати, посетете лекар за допълнителна диагноза
5. Този тест осигурява предполагаема диагноза за бременност. Потвърдената диагноза за бременност трябва да се постави само от лекар след оценка на всички клинични и лабораторни резултати.
6. Необичайно оцветената (напр. червена, кафява) урина може да доведе до неточни резултати.

ГРЕШКИ ПРИ ТЕСТВАНЕ



Възниква грешка по време на тестване. Възможните причини са:

- Абсорбиращият крайник не е бил насочен надолу при прилагането на урина.
- Използвано е твърде малко количество урина.
- Не са спазени други инструкции за употреба.



Тестването не протече според очакванията. Възможни причини са

- Количеството на пробата урина е твърде малко за започване на теста.
- Срокът на годност на теста е изтекъл.
- Не са спазени други инструкции за употреба.

При някои от гвете грешки по-горе трябва да тествате с нов тест, следвайки внимателно инструкциите.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТЕСТА СЛЕД УПОТРЕБА

Тестът съдържа батерии. Отстранете батериите преди изхвърляне на теста. Изхвърлянето на батериите трябва да бъде в съответствие с подходящия метод за рециклиране. За да извадите батериите, поставете монета в слота в края и завъртете, за да отворите задната част на теста.

Внимание: Не разглобявайте, не зареждайте и не изхвърляйте батериите в огън. Изхвърлете остатъка от теста според подходящия метод за рециклиране на електрическо оборудване. Не изхвърляйте електрическо оборудване в огън.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Колко точен е дигиталният бърз тест за бременност Advent life за hCG?

Проведена е клинична оценка на 142 проби от урина и резултатите, получени чрез теста за бременност, са сравнени с друг наличен в търговската мрежа тест за hCG в урина. Общата точност е >99%.

2. Как работи тестът?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността HCG (човешки хорион гонадотропин) и количеството му се увеличава в ранния стадий на бременността. Цифровият тест за бременност на hCG може да открие хормона в урината ви от 25 mIU/mL.

3. Колко скоро след съмнение за бременност мога да си направя теста?

Можете да тествате урината си още на първия ден от закъснението на цикъла Ви. Можете да се тествате по всяко време на деня. Ако сте бременна, първата сутрешна урина съдържа най-голямо количество хормон на бременността.

4. Трябва ли да тествам с първа сутрешна урина?

Въпреки че можете да тествате по всяко време на деня, първата Ви сутрешна урина е обикновено най-концентрираната. Използването на сутрешната урина може да представи по-точен резултат.

5. Колко чувствителен е тестът?

Цифровият hCG тест за бременност открива hCG в урината при ниво от 25 mIU/mL или по-високо. Добавянето на LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) и TSH (1000 µIU/mL) към отрицателни (0 mIU/mL hCG) и положителни (25 mIU/mL hCG) проби не показва интерференция от тези вещества върху резултатите от теста.

6. Какво трябва да направя, ако резултатът покаже, че съм бременна - "YES+ "?

Възможно е да сте бременна. Посетете лекар, за да потвърдите резултата и да получите допълнителна информация.

7. Какво трябва да направя, ако резултатът покаже, че не съм бременна - "NO- "?

Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на бременността да не е достатъчно високо, за да бъде открито. Ако цикълът Ви не започне в рамките на една седмица от деня, в който го очакване, повторете процедурата с нов тест. Ако получите същия резултат след повторно тестване и цикълът Ви все още не е започнал, трябва да посетите лекар.

8. Има символ "?" на екрана. Какво означава това?

"?" символът показва, че е възникнала грешка по време на тестването, можете да прочетете внимателно инструкциите и да тествате отново с нов тест. Вижте секция „Грешки при тестване“.

9. Използвах теста, но на дисплея не се появи резултат. Какво означава това?

Ако не се появи резултат, вижте секция „Грешки при тестване“.

ИЗТОЧНИЦИ

1. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
2. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 36-45

ИНДЕКС НА СИМВОЛИТЕ

- Предназначен за инвитро диагностика
- Температурно ограничение за транспортиране и съхранение: 2-30° C
- Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена
- Производител
- Број тестове в опаковката
- Срок на годност
- Партиген номер
- Прочетете инструкциите преди употреба
- Упълномощен представител в ЕС
- За еднократна употреба
- Каталоген номер
- Съхранявайте и транспортирайте при ≤ 90% RH
- Рециклиране: електронно оборудване
- Рециклируеми материали
- Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.**
#550 Yin Hai street, Hangzhou
Economic & Technological Development Area, Hangzhou,
310018 P.R. China
Email: info@alltests.com.cn
Web: www.alltests.com.cn

EC REP MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

АДВЕНТ ЛАЙФ ООД

ул. Г. Бенковски 11, София, България
тел.: +35928105480,
www.adventlife.net



ADVENT life
Health in Your hands



297x210mm

65g双胶纸,双面印刷,折好到货,
折后尺寸99x52.5mm,露出左上角标题